




Istruzioni per l'uso

DOCCIA NASALE

DOCCIA NASALE

IMETEC TYPE R1

GUIDA ILLUSTRATIVA [A]

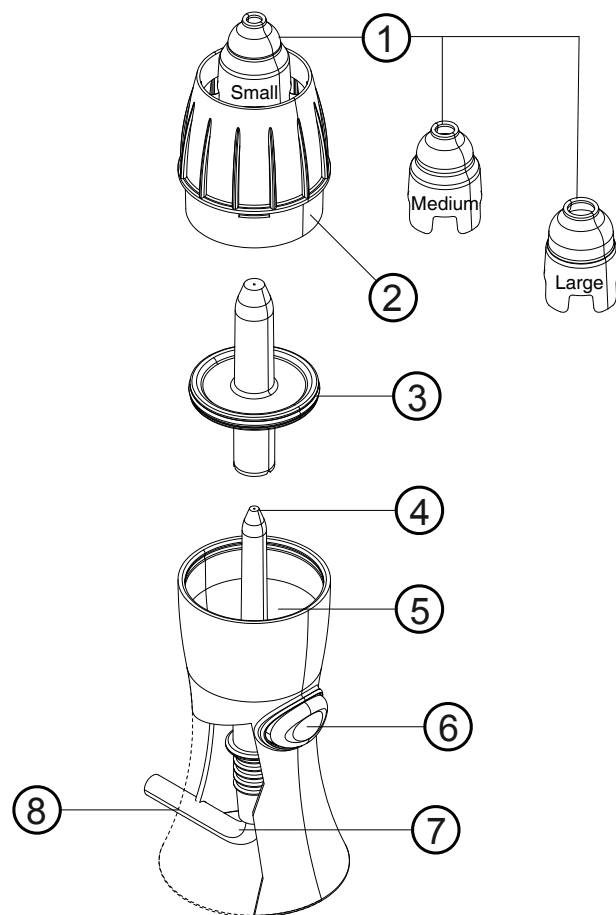

DATI TECNICI

Mod.R1
www.imetec.com
Med2000 srl
Padenghe sul Garda (BS) Italy



Manuale di Istruzioni per l'uso dell'apparecchio DOCCIA NASALE. Gentile cliente, IMETEC La ringrazia per l'acquisto del presente prodotto. Siamo sicuri che Lei apprezzerà la qualità e l'affidabilità di questo apparecchio, progettato e prodotto mettendo in primo piano la soddisfazione del cliente. Il presente manuale di istruzioni è stato redatto in conformità alla norma europea EN 62079.

ISTRUZIONI IMPORTANTI CONSERVARE PER USI FUTURI

ATTENZIONE! Istruzioni e avvertenze per un impiego sicuro.



Prima di utilizzare l'apparecchio, leggere attentamente le istruzioni per l'uso e in particolare le avvertenze sulla sicurezza, attenendosi a esse. Conservare il presente manuale insieme alla relativa guida illustrativa, per l'intera durata di vita dell'apparecchio, a scopo di consultazione. In caso di cessione dell'apparecchio a terzi, consegnare anche l'intera documentazione. Se nella lettura di questo libretto di istruzioni d'uso alcune parti risultassero di difficile comprensione o se sorgessero dubbi, prima di utilizzare il prodotto contattare l'azienda all'indirizzo indicato in ultima pagina.

AVVERTENZE SULLA SICUREZZA

- Dopo aver rimosso l'apparecchio dalla confezione, controllare l'integrità della fornitura in base al disegno e l'eventuale presenza di danni da trasporto. In caso di dubbio, non utilizzare l'apparecchio e rivolgersi al servizio di assistenza autorizzato.
- Il materiale della confezione non è un giocattolo per bambini! Tenere il sacchetto di plastica lontano dalla portata dei bambini; pericolo di soffocamento!
- Il presente apparecchio deve essere utilizzato unicamente allo scopo per cui è stato progettato, ovvero come doccia nasale per irrigazioni nasali ad uso domestico. Qualsiasi altro utilizzo è considerato non conforme e pertanto pericoloso.
- Questo apparecchio non deve essere utilizzato da bambini e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali senza sorveglianza.
- **NON** esporre l'apparecchio all'umidità o all'influsso di agenti atmosferici (pioggia, sole).
- **NON** utilizzare oli essenziali. Farmaci oleosi e sostanze oleose possono danneggiare gli accessori in plastica.
- **NON** utilizzare raccordi e accessori non previsti dal costruttore.
- La terapia con farmaci deve sempre essere prescritta dal medico che indicherà il tipo di farmaco, le dosi e le modalità di assunzione più idonei per il paziente.
- In presenza di patologie di origine microbica o virale, che comportano rischi di infezione e contaminazione, è indispensabile un uso


strettamente personale della doccia nasale.

- Per le caratteristiche dell'apparecchio, fare riferimento alla confezione esterna.
- Utilizzare unicamente con gli accessori forniti.

CONTROINDICAZIONI ALL'USO DEL PRODOTTO

Utilizzare il prodotto dietro prescrizione medica.

LEGENDA SIMBOLI

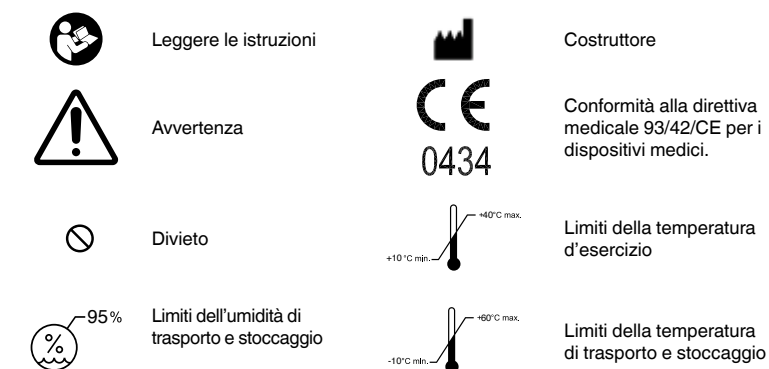

DESCRIZIONE DELL'APPARECCHIO (fig.A)

- | | |
|---|--|
| 1. Adattatori nasali: | secrezioni |
| • Small, colore bianco: adatto a bambini di età inferiore ai 3 anni; | 3. Pisper |
| • Medium, colore verde chiaro: adatto ai bambini dai 3 ai 12 anni; | 4. Ugello pisper |
| • Large, colore verde scuro: adatto a bambini dai 12 anni in su e per adulti; | 5. Parte inferiore doccia nasale o camera contenente la soluzione da nebulizzare |
| 2. Parte superiore doccia nasale o camera di raccolta | 6. Pulsante di erogazione |
| | 7. Punto di aggancio al tubo dell'aria compressa |
| | 8. Asola passatubo |

DESTINAZIONE D'USO

La doccia nasale micronizzata è un dispositivo che esegue il lavaggio fisiologico delle cavità nasali e rinofaringee. Il dispositivo si utilizza in collegamento ad un aerosol con compressore a pistone e nebulizza soluzioni saline o farmaci per terapia aerosolitica in particelle di dimensioni superiori ai 10 micron, atte a depositarsi nelle alte vie aeree.

Questo determina la fluidificazione delle secrezioni e ne consente la loro eliminazione mediante raccolta in una camera a se stante del dispositivo stesso.

Studi clinici evidenziano che con l'uso della doccia nasale:

- si raggiungono efficacemente i seni paranasali;
- si ha un'alta pervasività della soluzione o del farmaco utilizzato per il trattamento.

Vantaggi legati all'utilizzo della doccia nasale sono:


- rimuove secrezioni nasali in eccesso grazie all'azione fluidificante;
- migliora l'idratazione delle mucose;
- usata prima della seduta di aerosol terapia ne aumenta l'azione, liberando le vie aeree superiori e consentendo una corretta respirazione durante il trattamento.

GARANZIA

1. L'apparecchio è garantito per un periodo di due anni dalla data di consegna. Fa fede la data riportata sullo scontrino/fattura, a meno che l'acquirente non provi che la consegna è successiva.
2. In caso di difetto del prodotto preesistente alla data di consegna, IMETEC garantisce la riparazione o la sostituzione senza spese dell'apparecchio, salvo che uno dei due rimedi risulti sproporzionato rispetto all'altro. L'acquirente ha l'onere di denunciare al venditore il difetto di conformità entro due mesi dalla scoperta del difetto stesso.
3. Non sono coperte dalla garanzia tutte le parti che dovessero risultare difettose a causa di negligenza o trascuratezza nell'uso, mancata osservanza delle istruzioni per il funzionamento dell'apparecchio, errata installazione, manutenzioni operate da personale non autorizzato, normale usura, danni da trasporto ovvero circostanze che comunque non possono farsi risalire a difetti di fabbricazione dell'apparecchio.
4. La garanzia è inoltre esclusa in tutti i casi di uso improprio dell'apparecchio ed in caso di uso professionale.
5. IMETEC declina ogni responsabilità per eventuali danni che possano direttamente o indirettamente derivare a persone, cose ed animali domestici in conseguenza della mancata osservanza di tutte le prescrizioni indicate nell'apposito "Libretto Istruzioni ed avvertenze" in tema di installazione, uso e manutenzione dell'apparecchio.
6. Sono fatte salve le azioni contrattuali di garanzia nei confronti del venditore.

Modalità di assistenza

La riparazione dell'apparecchio deve essere effettuata presso un Centro Assistenza IMETEC. L'apparecchio difettoso, se in garanzia, dovrà pervenire al Centro Assistenza unitamente a codesto certificato di garanzia (in cui viene indicata la tipologia del prodotto) o ad un documento fiscale che ne attesti la data di vendita o di consegna.

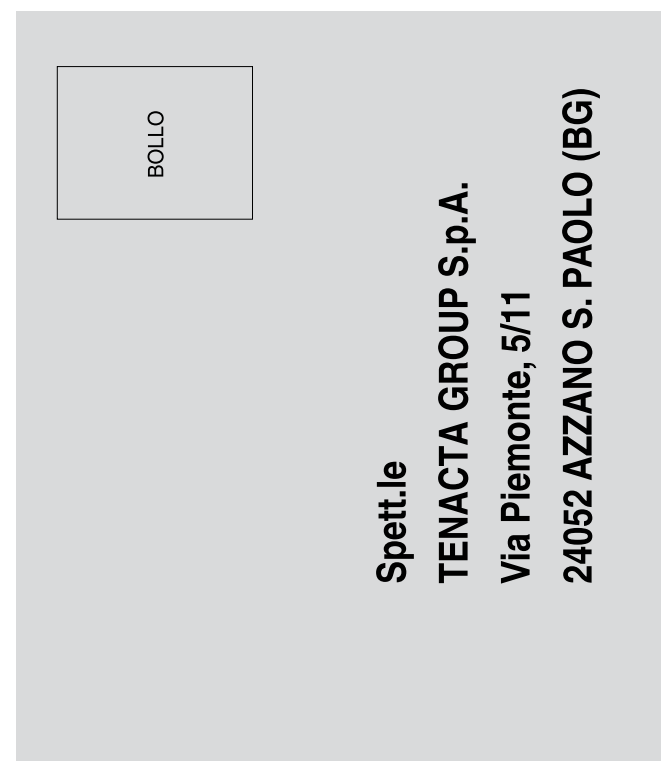

ART. DATA / /

CONSIGLI D'USO

La doccia nasale si utilizza con

- Soluzioni saline isotoniche o ipertoniche;
- Acque termali;
- Farmaci per aerosol terapia prescritti dal medico curante.

Per i lavaggi nasali quotidiani è possibile utilizzare una soluzione fatta in casa sciogliendo un cucchiaino di sale fino in mezzo litro di acqua potabile tiepida.

In caso di particolari malattie, come fibrosi cistica, o immediatamente dopo un intervento chirurgico, utilizzare acqua sterilizzata o portata ad ebollizione e lasciata raffreddare.



Attenzione! Non utilizzare con acqua bollente! Rischio di ustioni



Attenzione! Rischio di contaminazione microbica. In presenza di patologie di origine microbica o virale, che comportano rischi di infezione e contaminazione, è indispensabile un uso strettamente personale della doccia nasale.


UTILIZZO

Al primo utilizzo, procedere alla disinfezione come specificato nella relativa sezione.

- Lavarsi le mani accuratamente, prima e dopo l'utilizzo del prodotto.
- Sedersi comodamente in posizione eretta.
- Scegliere l'adattatore nasale (1) rispetto all'età o alla conformazione dell'anatomia nasale.

La doccia nasale si utilizza con

- **Soluzioni saline isotoniche o ipertoniche;**

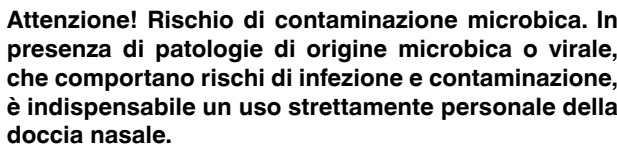

Al primo utilizzo, procedere alla disinfezione come specificato

- Avvertenza importante: prima del trattamento con farmaci, per**

• "Instruments" – conductive elements to design specific needs, combine and

Prima di procedere alla pulizia, spegnere l'aerosol e scollegare la doccia

Pulizia

- ## Disinfezione

- Immersione in una soluzione di acqua e aceto (nella proporzione di

- Attenzione: non disinfettare mediante bollitura delle parti componenti per evitare che le stesse possano deformarsi.**

Riassemblare inserendo

- ## SOSTITUZIONE COMPONENTI

PROBLEMI E SOLUZIONI

SMALTIMENTO





Ai sensi della norma europea 2012/19/UE, l'apparecchio in disuso deve essere smaltito in modo conforme. I materiali riciclabili contenuti nell'apparecchio vengono recuperati, al fine di evitare il degrado ambientale. Per maggiori informazioni, rivolgersi all'ente di smaltimento locale o al rivenditore dell'apparecchio.

Per le riparazioni o l'acquisto dei ricambi rivolgersi al servizio autorizzato


La doccia nasale Imetec NS 100 garantisce, se utilizzata correttamente,

La doccia nasale deve essere utilizzata con un compressore d'aria conforme alla normativa vigente.
In tabella 1 sono indicati i valori di flusso e pressione consigliati.

Capacità massima	18 ml
Capacità minima	1.5 ml
Residuo	1 ml
Flusso minimo	5 l/min.
Flusso Massimo	9 l/min.
Pressione minima in uso	0.6 bar
Pressione massima in uso	1 bar

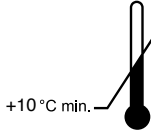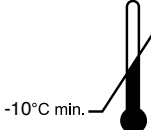TEMPERATURA D'ESERCIZIO	
TEMPERATURA DI STOCCAGGIO E DI TRASPORTO	 RH 95% max.
UMIDITÀ DI STOCCAGGIO E DI TRASPORTO	
CAPACITÀ MASSIMA	18 ML
PESO DELL'APPARECCHIO	50 GR
DIMENSIONI DELL'APPARECCHIO	120 (h) x 70 (l) x 70 (p) mm

Prodotto da

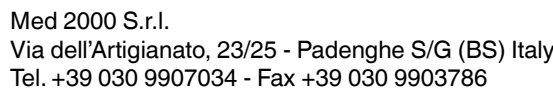

Numero Verde  **800-234677**

MI001179
0613 (MMYY)